

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Диск медицинский балансировочный поливинилхлоридный «Альпина Пласт» по ТУ 9398-012-17707123-2012

Диск медицинский балансировочный поливинилхлоридный «Альпина Пласт» (далее Диск медицинский балансировочный) предназначен для медицинских целей в лечебных учреждениях (в кабинетах массажа и/или лечебной гимнастики) и для индивидуального использования в домашних условиях.

Диски медицинские балансировочные используют для динамического сидения с целью уменьшения гиподинамии и улучшения кровотока, а также для поддержания в тонусе мышц поясницы, коррекции осанки, и снятия стресса.

Диски медицинские балансировочные предназначены для использования в качестве нестабильной поверхности с целью профилактики варикозного расширения вен; для реабилитации после травм и операций; развития координации движений и тренировки вестибулярного аппарата; стимуляции и релаксации мышечных тканей; обеспечения правильного положения позвоночника, снятия нагрузки с околопозвоночных мышц и для активации мышц-стабилизаторов с целью лечения и профилактики сколиоза, а также при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата. ***Перед применением проконсультируйтесь со специалистом (лечащим врачом)!***

Показания к применению: остеохондроз позвоночника, нарушение осанки (в соответствии с протоколом медицинских испытаний № 154 от 20 сентября 2012 года).

Противопоказания к применению дисков медицинских балансировочных: межпозвонковые грыжи.

Перед применением, при необходимости, подкачайте Диск медицинский балансировочный через клапан, используя насос с иглой. При использовании для динамического сидения Диски медицинские балансировочные подкачивать не требуется.

Дезинфекцию дисков медицинских балансировочных проводят промыванием в горячей воде ($t=50\pm 5$ °С) с применением нейтрального моющего средства и мягкой губки, не царапающей поверхность.

Диски медицинские балансировочные следует хранить в помещении при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделия не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Внимание! Использование дисков медицинских балансировочных для больных с проблемами опорно-двигательного аппарата должно проводиться под контролем специалиста!