

ИНСТРУКЦИЯ
по использованию
Спринцовок с твердым наконечником ТМ «Альпина Пласт»

Предназначение: для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования для ирригации и отсасывания жидкости.

Материал: баллон – поливинилхлорид, наконечник – полипропилен.

Срок годности спринцовки: 5 лет со дня изготовления

Инструкция по применению спринцовки с твёрдым наконечником.

1. Перед применением спринцовку следует продезинфицировать, предварительно разъединив баллон и наконечник. Баллон дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 10 ± 5 минут, полиэтиленовый наконечник - погружением в 3% раствор перекиси водорода.
2. В лечебных учреждениях баллон и наконечник дезинфицируют погружением в 3% раствор перекиси водорода или в 3% раствор хлорамина согласно МУ 287-113.
3. По окончании дезинфекционной выдержки спринцовку промывают проточной питьевой водой.
4. Перед применением спринцовку собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона; наконечник смазать вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром.
5. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным раствором более 30 минут.
6. После применения спринцовку промыть горячей водой и просушить.

Хранение.

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C . Спринцовка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Изготовлено в соответствии с требованиями регламента REACH

Внимание! Спринцовку для маслосодержащих средств не применять!